








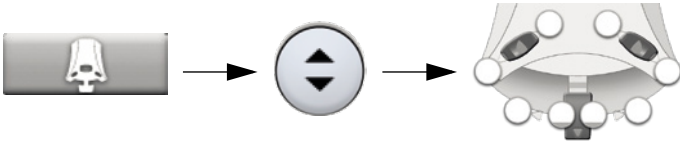


Patientstol kontrol

Kontrolpanel	
<p> Touch skærm er ulåst. Tryk for at låse. Touch skærm er låst. Tryk og hold nede for at låse op.</p>	
<p>Ryglæn ned så længe du trykker (manuelt)</p>	<p>Ryglæn op så længe du trykker (manuelt)</p>
<p>Stol ned så længe du trykker (manuelt)</p>	<p>Stol op så længe du trykker (manuelt)</p>
<p>Stol til autoposition</p>	
<p>Vis, hvilken fodkontrolfunktion der kører stolen til skylleposition</p>	
Fodkontrol	
<p> A Kort aktivering: Stol til autoposition A Lang aktivering: Ryglæn ned </p> <p> B Kort aktivering: Stol til autoposition B Lang aktivering: Ryglæn op </p> <p> C Kort aktivering: Stol til autoposition C Lang aktivering: Stol op </p> <p> D Kort aktivering: Stol til autoposition D Lang aktivering: Stol ned </p>	

Unit funktioner

Kontrolpanel		 Touch skærm er ulåst. Tryk for at låse.	 Touch skærm er låst. Tryk og hold nede for at låse op.
Vandglasfylder	<input type="button" value="Kort aktivering"/>		
Vandglaspåfyldning så længe der trykkes (manuel)	<input type="button" value="Lang aktivering"/>		
Fontæneskyl	<input type="button" value="Kort aktivering"/>		
Fontæneskyl, så længe der holdes nedtrykket (manuel)	<input type="button" value="Lang aktivering"/>		
Forprogrammeret døråbner / assistent kaldefunktion	<input type="button" value="Kort aktivering"/>		
Døråbner / assistent kaldefunktion så længe der trykkes (manuel)	<input type="button" value="Lang aktivering"/>		
Operationslampe Tænd ► Sluk	<input type="button" value="Kort aktivering"/>		
Juster intensiteten af operationslampen (manuel)	<input type="button" value="Lang aktivering"/>		
Operationslampens komposittilstand Til ► Fra	<input type="button" value="Kort aktivering"/>		
Operationslampens intensitet i komposittilstand (manuel)	<input type="button" value="Lang aktivering"/>		
Start ønsket timer	 → Vælg timer nummer		
Vedligeholdelses procedure	 → Vælg procedure		
Vis programmerede fodkontrolfunktioner			
Fodkontrol			
Funktionerne kan programmeres.			

Instrument funktioner

Kontrolpanel		Touch skærm er ulåst. Tryk for at låse.	Touch skærm er låst. Tryk og hold nede for at låse op.
Automatisk chip blow Tænd ► Sluk		Fiberoptik Tænd ► Sluk	
Scaler Skift driftstilstand		Turbine Effektreduktion Til ► Fra	
Mikromotor Reverse rotation Tænd ► Sluk		Mikromotor Grænse for omdr/min Tænd ► Sluk	
Mikromotor Momentgrænse Tænd ► Sluk		Mikromotor Skift driftstilstand, når momentgrænse er Til	Autostop Auto reverse Auto forward
Vis programmerede fodkontroffunktioner			
Fodkontrol			
Funktionerne kan programmeres.			


Programmering

Kontrolpanel

 Touch skærm er ulåst. Tryk for at låse.  Touch skærm er låst. Tryk og hold nede for at låse op.

Automatiske stolepositionsindstillinger


 Funktion er aktiv.  Funktion er ikke aktiv.

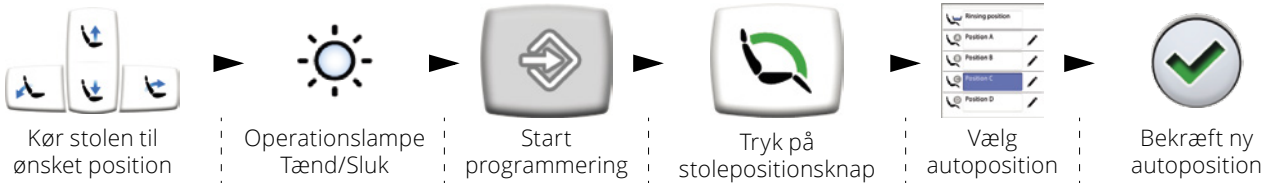

Unitindstillinger

 Funktion er aktiv.  Funktion er ikke aktiv.

De fleste programmeringer følger denne simple frekvens:

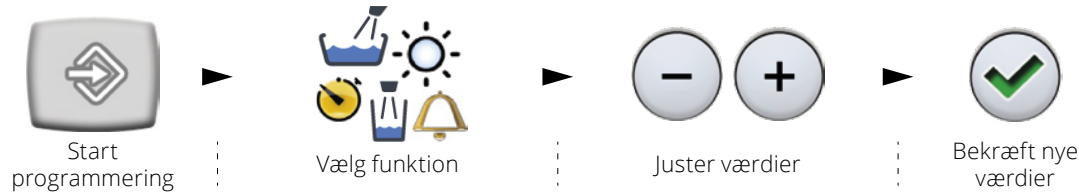

Instrumentindstillinger

 Funktion er aktiv.  Funktion er ikke aktiv.


De fleste programmeringer følger denne simple frekvens:



Flexy-knapfunktioner



Fodkontrolpedalens funktioner

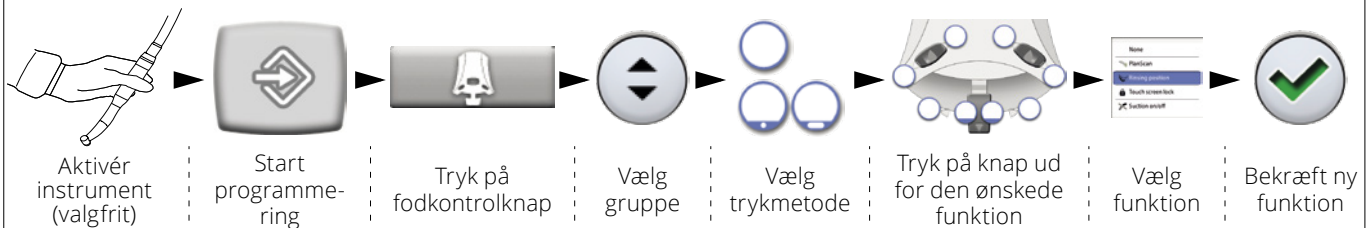

Tid- og datoindstillinger

 Funktion er aktiv.  Funktion er ikke aktiv.

